

Melkmonsters?



Neem ze makkelijk
en hygiënisch.



UBRO CARE

Voor meer informatie over producten en diensten van Boehringer Ingelheim kun je terecht op de website: www.ubrocare.nl



Boehringer
Ingelheim

Partner in uiergezondheid

Instructies voor het nemen van melkmonsters.



- 1 Gebruik per koe nieuwe wegwerphandschoenen.
- 2 Maak de uier en speen goed schoon met een droge papieren doek en melk de eerste stralen weg van het kwartier dat bemonsterd moet worden.
- 3 Ontsmet de speen met bijgeleverd tepeldoekje.
- 4 Melk opnieuw twee stralen weg. Neem het melkmonster, vul het buisje tot maximaal 3/4. Druk de dop op het buisje. (Voorkom tijdens de monsterafname aanraking met de rand van het buisje en de binnenkant van de dop!)
- 5 Dip de speen met een geschikte tepeldip.
- 6 Noteer datum, koenummer en het kwartier op het buisje met een watervaste stift. Bewaar het monster in de vriezer totdat het wordt ingestuurd.



UBRO CARE

Voor meer informatie over producten en diensten van Boehringer Ingelheim kun je terecht op de website: www.ubrocare.nl



Boehringer
Ingelheim

Partner in uiergezondheid